

VAXOL®

ΩΤΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ

Το Vaxol® είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος που μαλακώνει και απομακρύνει την κυψελίδα (κερί των αυτιών). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ανάγκη για έκπλυση η αυτή υποβοηθείται όπου κρίνεται απαραίτητη.

Το Vaxol® είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους.

Το Vaxol® διαθέτει ένα απλό και μοναδικό σύστημα που απελευθερώνει μια ορισμένη ποσότητα προϊόντος στο έξω ακουστικό πόρο του αυτιού. Εύκολο και άνετο στην χρήση. Αποτρέπει την υπερχειλίση του ακουστικού πόρου. Παρακαλώ διαβάστε το παρόν φυλλάδιο πριν από την χρήση.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ VAXOL® ΩΤΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ

- Πριν από την χρήση ενός νέου φιαλιδίου Vaxol®, θερμάνετε το ανάμεσα στις παλάμες σας, ανακινήστε καλά και στρέφοντας το μακριά σας, πιάσατε 3 η 4 φορές μέχρι όπου απελευθερωθεί το εκνέφωμα (διάγραμμα b). Η διαδικασία αυτή θα προετοιμάσει και θα επιβεβαιώσει ότι το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το Vaxol® είναι αποτελεσματικότερο αφού το θερμάνετε ανάμεσα στις παλάμες σας και το ανακινήσετε καλά πριν από την χρήση.
- Εφαρμόστε το Vaxol® σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
- Χρησιμοποιείστε μια ή δυο φορές την εβδομάδα ώστε να αποτρέψετε την συσσώρευση κυψελίδας και να βοηθήσετε την διαδικασία του φυσικού καθαρισμού.
- Εάν απαιτηθεί έκπλυση από τον γιατρό σας, εφαρμόστε 1 η 2 ψεκασμούς Vaxol® δυο φορές την ημέρα για 4 η 5 ημέρες πριν από την επίσκεψη σας σε αυτόν.
- Τραβήξτε απαλά προς τα επάνω και πίσω το πτερύγιο του αυτιού (διάγραμμα a).
- Κρατώντας το φιαλίδιο σε όρθια θέση, τοποθετήστε το ρύγχος του στον ακουστικό πόρο και πιέστε δυνατά τον ενεργοποιητή 1 η 2 φορές (διάγραμμα b).
- Κάνετε απαλό μασάζ (διάγραμμα a)
- Επαναλάβετε την διαδικασία και στο άλλο αυτί εάν είναι αναγκαία
- Μην ξελπένετε το αυτί μετά την εφαρμογή
- Μπορείτε να εφαρμόσετε το Vaxol® ενώ κάθεστε η στέκεστε όρθιοι
- Μπορείτε να αφαιρείτε και να ξελπένετε τον ενεργοποιητή με ζεστό νερό μετά από κάθε χρήση και κατόπιν να τον επανατοποθετείτε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ασθενείς με τραυματισμό ή ρήξη του τυμπάνου καθώς και με πόνο στο αυτί πρέπει να χρησιμοποιούν το Vaxol® κάτω από ιατρική παρακολούθηση.
- Το Vaxol® μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του ενός έτους μόνο μετά από σύσταση του γιατρού σας.

- Το Λάδι Ελιάς είναι ένα φυσικό προϊόν με πολύ μεγάλη χρήση. Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες η αλληλεπιδράσεις λόγω της χρήσης του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με αλλεργία η υπερευαίσθησία σε αυτό.
- Δεν έχουν γίνει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης η του θηλασμού, παρόλα αυτά ενημερώστε τον γιατρό σας όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης η θηλασμού.
- Δεν έχουν γίνει γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες από την υπερδοσολόγηση του προϊόντος.
- Εάν παρουσιάσετε αλλεργική αντίδραση στο προϊόν, σταματήστε αμέσως την χρήση του και ενημερώστε τον γιατρό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το Vaxol® πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο.
- Φυλάσσετε πάντοτε το Vaxol® σε όρθια θέση και σε θερμοκρασία δωματίου.
- Το προϊόν πρέπει να αποσύρεται έξι μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή.
- Καταστρέψτε το προϊόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Μη ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.
- Το Vaxol® εφαρμόζεται αποκλειστικά στον ακουστικό πόρο. Μη ψεκάζετε κοντά στα μάτια, τη μύτη η το στόμα.

Παραγωγή:

HL Healthcare Ltd
112-114 Witton Street
Northwich
Cheshire CW9 5NW
United Kingdom

Διανομή:

FARMASYN S.A., Μονής
Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι,
Αθήνα. Τηλ. 210 5777140
Fax. 210 5788791

Vaxol® is a registered
trademark of FW Medical Ltd.
Τελευταία τροποποίηση
φυλλαδίου: Ιούνιος 2013.

Το Vaxol® ανήκει στην
κατηγορία medical device
class 1 σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/CEE

